

# PROCEDIMENTO DEL TRATTAMENTO

**Esame:** analizzare la cute e i capelli. Consigliare il trattamento adatto e circa 6 sedute a scadenza settimanale, poi uno di mantenimento mensile.

**Pulizia:** usare lo shampoo adatto per capelli o cuoio capelluto; lo scrub e poi il tonico per i trattamenti al viso. Per il corpo e le cosce può bastare passare il tonico con un po' di cotone.

**Cuoio capelluto:** per problemi di caduta, forfora e sebo, dopo il lavaggio, distribuire sul cuoio capelluto 12 gocce di Lotion stem e 12 di Energizzante lozione; capelli sfibrati, fragili: sulla lunghezza, dopo il lavaggio e aver fatto la maschera, distribuire sulla lunghezza Nutry keratin jaluronic o jalufiller. Sul viso: Jalufiller. L'apposito gel per il trattamento cellulite.

**Manipolo mesoterapia:** usare per 5 minuti sui capelli o sul cuoio capelluto in modo circolare. 3 minuti per lato sul viso. 5 minuti per la cellulite o smagliature. Le frequenze sono quelle indicate sul manuale.

**Manipolo ultrasuoni:** se necessario distribuire ancora un po' di Energizzante lozione e procedere all'utilizzo del manipolo in senso circolare ai tempi e frequenze come sopra.

**Manipolo freddo:** usare per ultimo per chiudere i pori, sempre con i suddetti tempi.

**Terminare:** sul cuoio capelluto con la lozione specifica e 3 minuti di massaggio in scarico; sulle lunghezze, con nutry Milk elixir spray; sul viso e sul corpo con una crema appropriata e il relativo massaggio di pochi minuti.

**Manipolo contorno occhi:** procedere come per il viso, ma non utilizzare il manipolo ultrasuoni. La crema finale può essere scelta fra l'antietà (rughe) o contorno occhi.



# CHE COS'È LA MESOTERAPIA VIRTUALE

La **mesoterapia virtuale** è una nuova tecnica usata in estetica e sfrutta i principi di elettroporazione ed elettro-osmosi. A differenza della mesoterapia medica ad ago non è invasiva, non è dolorosa, non lascia lividi e nemmeno fori che farebbero volatilizzare il prodotto.

## Elettroporazione:

è l'emissione di onde elettromagnetiche che aprono le membrane cellulari superiori (apre i pori della pelle), contribuendo così ad introdurre sostanze. Questo meccanismo ha la particolarità di essere reversibile e transitorio, non costante, il che significa che la membrana cellulare viene nuovamente chiusa quando si solleva il manipolo generando così anche un'efficace massaggio.

## Elettro-osmosi:


consiste nell'introduzione di principi attivi attraverso un'osmosi elettrica che diffonde sostanze invertendo la polarità elettrica delle cellule. favorisce l'ingresso di nuove molecole, le pareti della membrana riprendono poi la loro polarità originale. Questo provoca cambiamenti nella configurazione dello strato interno ed esterno della pelle, realizzando così un effetto levigato e dà ottimi risultati per vari inestetismi.

## Applicazioni:

→ Cuoio capelluto, viso e corpo.

## Risultati:

- Favorisce la penetrazione dei principi attivi;
- Aumenta la circolazione sanguigna periferica
- Contrasta la caduta dei capelli e ne favorisce la crescita;
- Riequilibra la secrezione sebacea;
- Attenua i segni d'espressione e le piccole rughe.
- Attenuazione della cellulite recuperando elasticità e lucentezza;
- Combatte il cedimento della pelle;
- Idratazione della pelle.

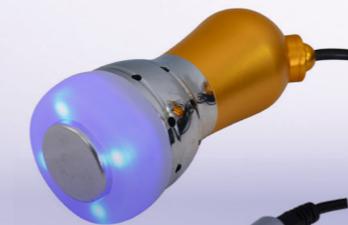

**1. Manipolo elettroporazione:** agisce direttamente sulla pelle, istantaneamente migliora la penetrazione dei prodotti nel tessuto cutaneo. Con una funzione di elettroshock, si formeranno delle aperture nella membrana cellulare; allo stesso tempo, le molecole di prodotto che non sono state assorbite verranno miniaturizzate così da poter penetrare all'interno delle cellule.

**2. Manipolo ultrasuoni:** il Massaggio con il manipolo invia flussi in alta velocità e vibrazioni ultrasoniche nella pelle, 28,000 vibrazioni al secondo. Queste vibrazioni sono scientificamente progettate per aiutare a rimuovere le imperfezioni della pelle, quali cellule morte, particelle di sporco e grasso, bulbi capillari indeboliti, macchie iperpigmentate, creando un effetto di una pelle morbida e liscia, capelli più robusti.

**3. Manipolo del freddo:** il martello freddo è utile per restringere i pori e richiuderli dopo il trattamento capelli, antirughe e lifting del viso e mantiene la pelle elastica, sana ed energica. È in grado di richiudere i pori, calmare la cute e rilassare.

**4. BIO manipolo per il contorno occhi:** ha un ruolo importante nelle zone localizzate della pelle, come ad esempio zampe di gallina, occhiaie. Il trattamento micro-elettrico è dotato di ioni negativi in modo da stimolare i punti di agopuntura locali, in modo che il tessuto sottocutaneo avrà una rigenerazione del collagene. Si otterrà così una efficace distensione della pelle.

TABACCO

ESPOSIZIONE AL SOLE

STRESS

INQUINAMENTO

MANCANZA DI SONNO

*Il fumo è senza dubbio uno dei fattori che maggiormente incidono sull'invecchiamento cutaneo precoce, danneggiando i tessuti a livello della pelle perché contrasta la produzione di collagene.*

*L'eccessiva esposizione ai raggi UV A e UV B causa disidratazione cutanea e può generare danni anche permanenti alle cellule del derma.*

*Quando lo stile di vita è costantemente frenetico e stressante, si può verificare un indebolimento delle difese immunitarie e il tessuto cutaneo può diventare più vulnerabile.*

*L'inquinamento ambientale e atmosferico ha un effetto importante sull'invecchiamento precoce della pelle del viso, che si presenterà meno tonica, meno liscia e meno ossigenata.*

*Anche la stanchezza e mancanza di sonno amplifica l'invecchiamento della pelle.*